

Optimaler Prothesenreiniger für Ihren Flexiwell Zahnersatz

Val-Clean® ist ein konzentriertes Reinigungspulver, das speziell auf die Reinigung Ihres Flexiwellproduktes abgestimmt ist. Anders als bleichmittel- oder schleifpartikelhaltige Prothesenreiniger verhindert Val-Clean ein frühzeitiges Ausbleichen oder Abstumpfen der Prothese.

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


Prothesenreiniger bestellen unter:

Telefon: 02685/ 73 08

Hier erhalten Sie auch das optimale
Reinigungsgerät für Flexiwell.

Oder direkt bei Ihrem Zahnarzt



Pflegehinweise



flexiwell®

Gesund mit metallfreiem Zahnersatz

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem neuen Flexiwell-Zahnersatz gefertigt aus einer neuen Generation Prothesenkunststoff.

Die besonderen Materialeigenschaften garantieren eine optimale Verträglichkeit sowie einen völlig neuen Tragekomfort bei gleichzeitig natürlicher Ästhetik.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Flexiwell Zahnersatz haben, ist es wichtig, diese kurzen Pflegehinweise zu beachten:



😊 Reinigen Sie Ihren Flexiwell-Zahnersatz 2x täglich. Dazu spülen Sie Ihren Zahnersatz unter fließendem, warmen Wasser. Anschließend bürsten Sie diese mit einer Zahnbürste am besten mit Seife. Zahnpaste vermeiden – diese enthält Schleifpartikel und raut die Oberfläche auf. Legen Sie die Flexiwell-Prothese für 30 Minuten in ein Reinigungsbad mit Val-Clean®. Bitte keinen handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden.



😊 Wenn möglich spülen Sie die Prothese kurz nach jedem Essen unter fließendem Wasser ab, um eventuelle Essensrückstände zu entfernen.

😊 Bitte beachten Sie die Pflegehinweise Ihres Zahnarztes für Ihre natürlichen Zähne und Ihr Zahnfleisch.

